

Технические характеристики

Charger 1.0 miniRITE R

Конструкция зарядного устройства облегчает ежедневную зарядку аппаратов, сводя ее всего к нескольким простым действиям.

Зарядка

- Просто снимите слуховые аппараты и поместите в зарядное устройство — даже не нужно открывать крышку.
- Слуховые аппараты автоматически начинают заряжаться после размещения в зарядном устройстве и автоматически включаются после извлечения из него.
- Заряжайте слуховые аппараты каждую ночь, чтобы с утра они были полностью заряжены и готовы к новому дню.

Интуитивно-понятное управление

По светодиодному индикатору на слуховом аппарате пользователь может легко понять состояние зарядки:

- Оранжевый/красный* = выполняется зарядка
- Зеленый = полностью заряжен

Непродолжительное время зарядки

Если слуховые аппараты полностью разряжены, то обычное время зарядки составляет:

- 3 ч = полная зарядка
- 1 ч = зарядка на 50 %
- 0,5 ч = зарядка на 25%

Факты об изделии

- Зарядка индуктивным способом
- Светодиодный индикатор включения/выключения
- Магнитное соединение — слуховые аппараты удерживаются в зарядном устройстве
- Фиксированный кабель питания
- Резиновая ножка для повышения стабильности
- Скругленная форма корпуса — легко чистить
- В комплект входит мягкий чехол для переноски



Зарядное устройство предназначено для зарядки аппаратов miniRITE R. В его основе — индуктивная технология, и оно полностью заряжает слуховые аппараты в течение трех часов беспроводным способом.

Предназначено для
miniRITE R
Oticon More™
Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™
Oticon Ruby

Зарядные порты
В них устанавливаются аппараты для зарядки

Блок питания**


- **Разъем USB**
Вставляется в блок питания или другой источник питания

Светодиодный индикатор на слуховом аппарате
Оранжевый/красный* = выполняется зарядка
Зеленый = полностью заряжен

Светодиодный индикатор
Индикатор включения/выключения

Кабель питания

* Цвет индикатора в зависимости от слухового аппарата может быть оранжевым или красным
** Штепсельные вилки в разных странах могут отличаться

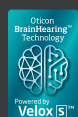

Технические данные Зарядное устройство	
Название	Charger 1.0, Oticon miniRITE R
Предназначено для/совместимо с	Oticon More™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™, Oticon Ruby: miniRITE R
Размеры	Ø95 мм/общая высота 39 мм
Масса	135 г
Цвет	Черный
Разъем питания	USB A
Индикатор состояния	Светодиодный индикатор на зарядном устройстве: Показывает включение/выключение зарядного устройства Светодиодный индикатор на слуховом аппарате во время зарядки: Показывает режим зарядки
Время зарядки слуховых аппаратов	Макс. 3 ч в зависимости от начального уровня заряда батарейки (Температура: от +10 °C до +35 °C) Макс. 4 ч в зависимости от начального уровня заряда батарейки (Температура: от +5 °C до +10 °C и от +35 °C до +40 °C)
Источник питания	Блок питания из комплекта поставки
Входное напряжение	5 В пост. тока
Входной ток	< 0,2 А (при зарядке двух слуховых аппаратов) < 10 мА в резервном режиме (без вставленных слуховых аппаратов)
Кабель	Фиксированный кабель, длина 150 см
Подключение к внешнему оборудованию	В случае подключения к внешнему оборудованию, вилка которого вставлена в настенную розетку, данное оборудование должно соответствовать стандартам безопасности IEC 62368-1 или эквивалентным стандартам.
Условия использования	
Условия эксплуатации	Температура: от +5 °C до +40 °C Относительная влажность: от 5 % до 93 %, без конденсации
Условия хранения и транспортировки	Температура: от -25 °C до +70 °C Относительная влажность: от 5 % до 93 %, без конденсации
Атмосферное давление	от 700 гПа до 1060 гПа
Технические данные Блок питания	
Входное напряжение	100-240 В перем. тока
Входная частота	50-60 Гц
Выходное напряжение	5 В пост. тока
Выходной ток	1 А



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Дания

Головной офис
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Дания